

Allmänt

Stänkskyddet är tillverkat av en tålig galonduk. Skyddet trycks fast mot överliggarens fästen efter att bordet ställts upp. Skyddet hänger normalt fritt framför bordet.

I de fall skyddet används tillsammans med ett badkarsbord – som på denna bild till höger – kan slitsar klippas nertill mitt för benen så att dukens nedre del därigenom kan föras innanför badkarskanten. Vi rekommenderar att fulla höjden bibehålles.

Rengöring

Duken torkas av med en fuktig torkduk och torkas torr med handduk före hopvikning. Var noga med att hålla rent speciellt kring tryckknapparna.

Komplettering med montering i efterhand

När ett redan levererat bord skall kompletteras med ett stänkskydd måste tryckknappar POP-nitas fast i överliggaren. Borrmall för borring, tryckknappar, nitar och borr medföljer därför leveransen av stänkskyddet. POP-nittång och körnare ingår ej.

1. Res upp bordet i arbetsställning.
2. Tejpa fast galonmallen längs överliggaren så att dess långsida ligger längs överliggarens spår enligt Fig.1.
OBS! På bord som levererats efter juni 2007 kan små markeringar för hål redan finnas på en av överliggarna.
3. Körnslå i markeringshålen och borra hålen.
4. POP-nita fast hondelarna med levererade nitar och påsatt distans enligt Fig. 2.
5. Nu kan stänkskyddet hängas upp.



Fig. 1



Fig. 2