

Bordet levereras normalt från oss i monterat skick, men vid förvaring eller för transport på flyg etc kan bordet demonteras och delarna läggas i påsar som sedan samlas i en mjuk bärväska.



Utgångsläge:


Ha bordet liggande upp- och nervänt på plant underlag (säng eller bordsskiva) med överliggaren med markeringarna 2 och 4 närmast framför dig.

1. Lossa låsbyglarna och lägg dem vilande på sina respektive skruvar (fig 1).

2. Ta sedan bort de fyra rattskruvarna från krysstaget, lyft bort och fäll ihop detta.

Lossa och skruva bort rattskruvarna som sitter i respektive benände (fig 2).

Knacka loss benen från fästvinklarna och vik samman benkryssen. Sätt ett gummiband el dyl på mitten som håller delarna samman.

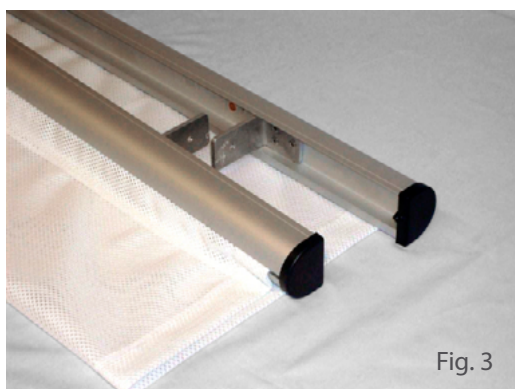

3. Lägg samman överliggarna vända mot varandra så att fästvinklarna går att sticka in i rännan (fig 3). Vik duken runt och håll samman med en spännrem.

Stoppa in delarna i sina påsar och förvara alltsammans i väskan.

1. Ta fram och lägg överliggarna på ett plant underlag. Överliggaren med markeringarna (siffrorna 2 och 4) skall ligga närmast framför dig med fästvinklarna vända uppåt.

2. Vik ut benkrysset (från påse 1-2) till ett X och identifiera ändarna märkta 1 och 2. Vänd benen så att de svarta fötterna pekar uppåt. Låt låsbygeln vila mot den utstickande skruven.

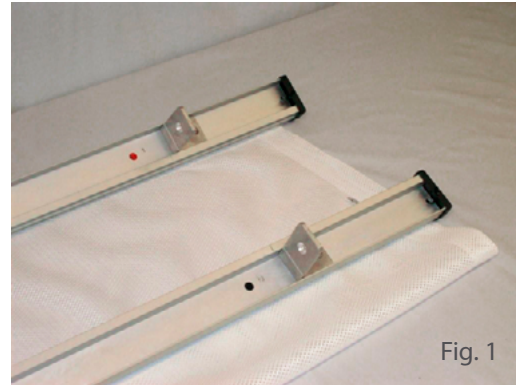


Fig. 1



Fig. 2

Passa ände 1 mot insidan av fästvinkel 1 och skruva fast med rattskruv. Passa ände 2 mot insidan av fästvinkel 2 och dra fast. (fig. 2)

Vik på motsvarande sätt (från påse 3-4) ut det andra benkrysset. Se till att låsbygeln vilar mot skruvänden när fötterna pekar uppåt. Passa ändarna 3 och 4 mot respektive siffror i överliggarna på insidan av fästvinklarna.

Ta krysstaget från påse 5 och fäll ut det så att änden med siffran 5 är synlig uppe till höger och siffran 7 uppe till vänster. Passa in krysstaget mot motsvarande märkning på benen. Dra fast rattskruvarna och kontrollera att stagets ändar ligger an mot benen.



Lyft ner bordet och ställ det i arbetsläge. Kontrollera att alla rattskruvar är åtdragna.

Fäll ut bordet helt så att duken spänns och fixera i utfällt läge med låsbyglarna.

Bordet är nu färdigt att användas!

