

Liggunderlag/Duk

Liggunderlag/dukar finns i två varianter:

- Vattengenomsläpplig vit duk, något elastisk och mjuk.
- Galonduk, i blått utförande.

Vid byte av duk

1. Bordet fälls ihop och två plastgavlar avlägsnas.
2. Drag ut duken likformigt från spåren i de båda överliggarna.
3. Stick in den återanvändbara låstråden i den nya dukens kanaler.
4. Mata därefter in duken likformigt i sin fulla längd i överliggarnas spår. Fäll ut bordet och släta ut duken.
5. Sätt åter fast gavlarna.



Plastgavel

Plastgaveln är normalt fastklämd i vardera änden av överliggaren. Vid dukbyte måste gavlarna i bordets ena ände tas bort.

På bord levererade efter 2006 är gaveln säkrad med ett buntband som går genom hål i gavelkanten och i profilbotten. (De tidigast levererade borden saknar denna säkring och har heller inget hål i profilen för bandet.)

Med varje gavel följer ett buntband. Vi rekommenderar att gaveln säkras med detta band. Ett hål på fem millimeter kan behöva borras i äldre bord.

På bilden till höger visas buntband som håller fast en lossad gavel.

